

Wijzigen van de codes.

Na vervanging kan het mogelijk zijn dat de toegangscode aangepast moeten worden.
Dit kunt u doen op de volgende manier:

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de standaard onderhoudscode zoals die al geprogrammeerd staat : 1111

Gebruikerscode wijzigen:

1111V

Kast openen

03V

Nieuwe code V

Kast dicht

Onderhoudscode wijzigen:

1111V

Kast openen

04V

Nieuwe code V

Kast dicht