

Prestan Professional Baby Reanimatiepop


Gebruiksklaar maken van de baby reanimatiepop

1. Plaats 2 AA batterijen (niet meegeleverd) onder het klepje in de luier.
2. Open de torso van de baby reanimatiepop door de torso bij de schouders los te klikken en deze voorzichtig omhoog te trekken.
3. Vouw de longzakjes:
 - Het longzakje heeft 4 gestippelde lijnen gedrukt op de zijkant van de longzak.
 - Gebruik deze 4 lijnen en vouw de longzakjes zoals op onderstaande afbeelding wordt getoond.



4. Kantel het hoofd van de reanimatiepop naar achteren.
5. Breng het longzakje, gevouwen zoals bij punt 2, in de mond van de reanimatiepop tot deze uit de nek van de reanimatiepop komt.

6. Trek het longzakje langzaam omlaag door de nek.
7. Het longzakje moet nu boven op de compressie plaat liggen (het hardplastic stuk aan de bovenkant van de torso.)

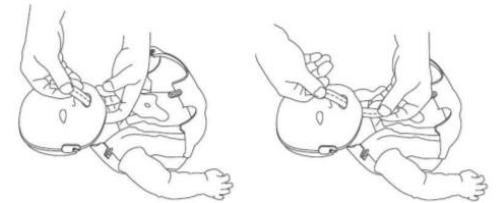

8. **CONTROLEER OF HET LONGZAKJE NIET GEDRAAID/GEVOUWEN ZIT IN DE TORSO!**
9. Bevestig de uiteinden van het longzakje aan de zijkant van het hoofd van de reanimatiepop.



10. De torso kan nu worden dichtgemaakt door deze weer vast te klikken bij de schouders. Ben voorzichtig dat de huid van de reanimatiepop niet wordt dubbelgevouwen.

Wat geeft de monitor aan?

De reanimatie baby pop geeft via een unieke manier de frequentie en de diepte van de compressie weer tijdens het reanimeren. Wanneer op de aan/uit knop aan de voorkant van de baby reanimatiepop wordt gedrukt zullen er 4 lampjes gaan branden. Dit geeft aan dat alle lampjes werken en de batterij over voldoende capaciteit beschikt. Vervolgens zal een rood lampje blijven knipperen. U kunt nu starten met reanimeren.

Bij het reanimeren geven de lampjes aan wat de juiste compressiesnelheid is. Ook hoort u een klikgeluid wanneer de compressie diep genoeg is.

Wat houden de lampjes in:

- 0-60 compressies per minuut. Het lampje brandt rood.
- 60-80 compressies per minuut. Het lampje brandt oranje.
- 80-100 compressies per minuut. 1 lampje brandt groen.
- 100-120 compressies per minuut. Beide lampjes branden groen. Dit is de juiste compressiesnelheid. Vertraagt de juiste compressiesnelheid, dan zal er een groen lampje doven om aan te geven dat het tempo moet worden verhoogd.

CHRISTEL
Klantenservice

