

## Laerdal Little Baby QCPR – Huilen na verstikking

Met de Little Baby QCPR kunt u ook levensecht verstikkingstechnieken oefenen. Wanneer deze juist worden uitgevoerd, zal de baby net als in het echte leven, gaan huilen.

Om de baby te laten huilen dienen de volgende handelingen uitgevoerd te worden:

- Zet de baby aan
- Geef 5 slagen tussen de schouderbladen
- Voer 5 borstcompressies uit
- Geef daarna 1 á 2 slagen tussen de schouderbladen

Als deze handelingen juist zijn uitgevoerd zal de baby gaan huilen.

Stap 1: 5 keer



Stap 2: 5 keer



Stap 3: 1 á 2 keer



CHRISTEL  
Klantenservice

