

GEBRUIKSHANDLEIDING

SOFTWARE UPDATE

EV-07B/EV-07BX-E/EV-04/MS5x



Software-update tracker

Voordat u uw tracker kunt updaten is het belangrijk dat de parameter editor software is geïnstalleerd op uw computer. Met deze software kunt u instellingen veranderen van uw noodknop/horloge, maar ook de software updaten. De parameter editor software kan worden geïnstalleerd op Windows computers.

Installeren parameter editor software

Ga naar mijnSOS.nl en klik onderaan de pagina op de link [downloads](#) of ga naar mijnsos.nl/downloads. Op deze pagina staan drie manieren om de tracker in te stellen, de tweede manier is via de software. Bij het kopje *Software* staat een knop met een [link](#) waarmee de software kan worden gedownload als zipbestand. Bij het downloaden kan uw virusscanner een waarschuwing geven of het bestand preventief verwijderen, zet in dit geval uw virusscanner tijdelijk uit. Pak vervolgens het zipbestand uit op een locatie naar keuze op uw computer.

Let op: Zet nooit uw virusscanner onnodig uit. Als de virusscanner de software toch als verdacht ziet, zet hem dan na het gebruiken van de software zo snel mogelijk weer aan.

Openen van de software

Voordat u de software kan openen moet u eerst Java downloaden. Als u dit nog niet heeft geïnstalleerd op uw computer ga dan naar de officiële website van Java: www.java.com/nl/download/ en download hier vervolgens de laatste versie van Java. Open vervolgens de map met de software en dubbelklik op het bestand genaamd *ParamEditTool-0.7.7.jar*.

Let op: Controleer goed dat de laatste versie 0.7.7 is geïnstalleerd.

Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
evd	22-9-2022 09:47	Bestandsmap	
html	22-9-2022 09:47	Bestandsmap	
jre	22-9-2022 09:47	Bestandsmap	
lib	22-9-2022 09:47	Bestandsmap	
logs	24-9-2022 08:02	Bestandsmap	
static	22-9-2022 09:47	Bestandsmap	
temp	24-9-2022 07:53	Bestandsmap	
ParamEdit_32bit_0.7.7.exe	11-7-2022 17:46	Toepassing	370 kB
<u>ParamEditTool-0.7.7.jar</u>	14-7-2022 17:03	JAR-bestand	737 kB
ParamEditTool-start.bat	11-7-2022 17:44	Windows-batchbe...	1 kB
nxbParallel.dll	22-9-2022 09:48	Toepassingsuitbrei...	47 kB
nxbSerial.dll	22-9-2022 09:48	Toepassingsuitbrei...	76 kB

Als het goed is opent de GPS Tracker Parameter Editor nu en krijgt u het scherm op de volgende pagina in beeld.

Aansluiten van de tracker

Zorg ervoor dat uw tracker opgeladen en ingeschakeld is en sluit uw tracker aan op uw computer via de meegeleverde USB-kabel.

EV-07B(X-E): Klik de magnetische oplader op de tracker en sluit de andere kant van de kabel aan op een USB-poort van uw computer.

EV-04 / MS5x: Plaats de tracker in de meegeleverde docking station en verbind met de meegeleverde USB-kabel de docking station met uw computer.


Model selecteren

Voordat de tracker kan worden geüpdatet moet het model van de tracker worden geselecteerd. Het model vindt u op de doos van de tracker.

Klik linksboven op de knop *Model* en selecteer vervolgens het model van uw tracker. Het geselecteerde model verschijnt vervolgens onder aan de pagina.


Let op:

- De software maakt geen verschil tussen de EV-07B en de EV-07BX-E, kies voor beide trackers de optie EV-07B.
- Kies voor het MS5x alarm horloge het modelnummer EV-05.

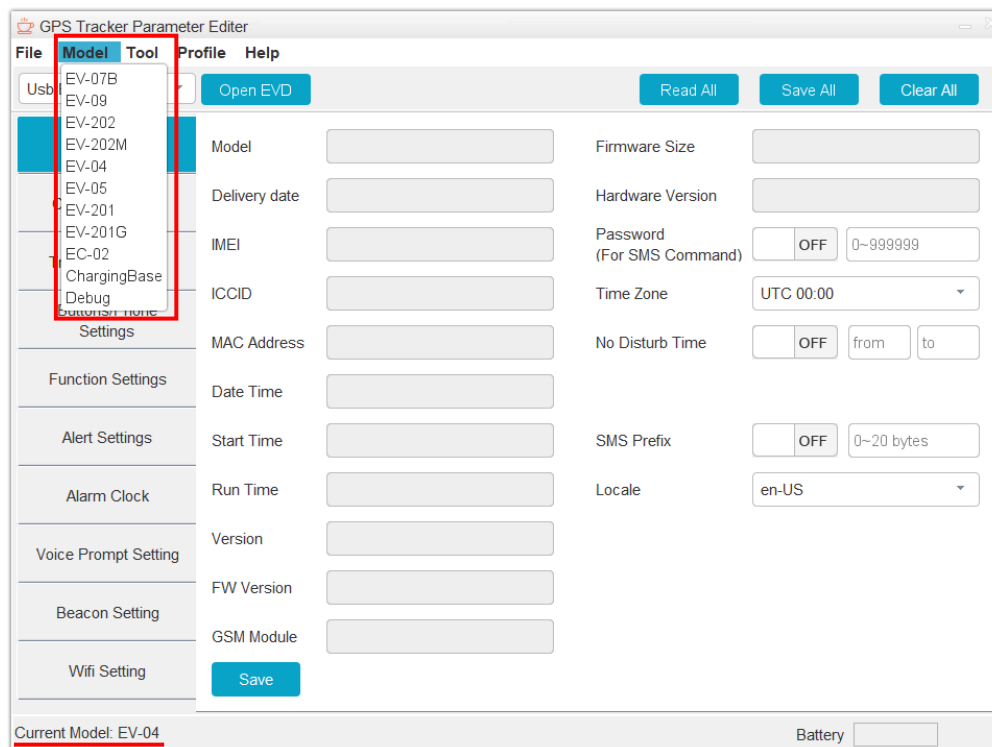

EV-07B(X-E): Klik na het selecteren van dit model op de knop *Read All*. Vervolgens verschijnen alle huidige instellingen in beeld.

EV-04 / MS5x: Klik eerst op het ververs icoontje naast de *Open EVD* knop en wacht totdat er een code in het vakje daarnaast verschijnt. Klik daarna op de knop *Open EVD* en wacht vervolgens even tot de knop verandert naar *Close EVD*. Klik daarna op de knop *Read All* en alle huidige instellingen verschijnen in beeld.

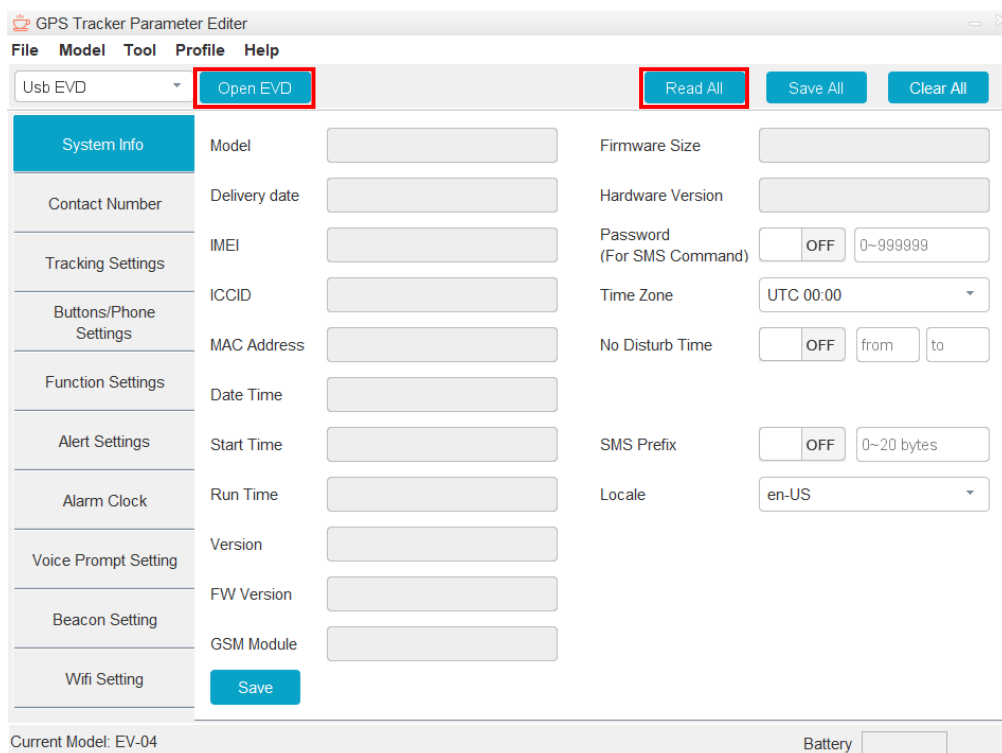

Controleer na het uitlezen van uw tracker het exacte modelnummer, dit heeft u nodig voor het kiezen van de juiste software. Vooral als u een EV-07B of EV-07B-XE heeft, is het belangrijk om te kijken op welke letters het modelnummer in de software eindigt, er zijn namelijk drie verschillende software varianten voor de EV-07's: -07B, -07BX en -07BG.

GPS Tracker Parameter Editor

File Model Tool Profile Help

Usb Hid Read All Save All Clear All

System Info Model EV07BX Firmware Size 335872

Contact Number Delivery date

Tracking Settings IMEI

Buttons/Phone Settings ICCID

Function Settings MAC Address

Alert Settings Date Time 2022-09-20 14:52:44

Alarm Clock Start Time 2022-09-20 14:52:05

Voice Prompt Setting Run Time 39

Beacon Setting Version v1.0.36.07

Home WiFi FW Version V07BX.8601.2207

GSM Module

Save

Current Model: EV-07B Battery 0%

Download software tracker

Ga voor het downloaden van de software voor uw noodknop of horloge naar mijnsos.nl/software-update. Onderaan de pagina vindt u een overzicht met de noodknoppen en horloges waarvoor software beschikbaar is. Onder de knop "Download de software" kunt u vervolgens de software downloaden die u nodig heeft.

Let op: De software is in het formaat van een zip-bestand dat u niet moet uitpakken. De parameter editor tool heeft namelijk een zip-bestand nodig om de update uit te kunnen voeren.



Model: EV-04


Model: EV-07B / EV-07B-XE
Kijk in de parameter editor
software voor het
specifieke modelnummer

Model: EV-05
Hetzelfde als de MS5x

Download de software

- Software EV-04
- Software EV-07B
- Software EV-07BG
- Software EV-07BX
- Software EV-05



Chat direct met ons team
Direct een reactie



Bel ons voor advies
Tijdens kantooruren direct antwoord



YouTube
Bekijk video's over onze producten



E-mail
Binnen 24 uur antwoord

Updaten software

Wanneer u de software voor de tracker heeft gedownload op uw computer kunt u weer teruggaan naar parameter editor tool om de software te installeren op de tracker. Ga hiervoor naar het menu *Tools* en klik op *Tracker Upgrade*.

GPS Tracker Parameter Editor

File Model Tool Profile Help

Usb Hid

Tracker Upgrade

Shutdown

Reboot

Re-factory Settings

System

Contact Number

Tracking Settings

Buttons/Phone Settings

Function Settings

Alert Settings

Alarm Clock

Voice Prompt Setting

Beacon Setting

Home WiFi

Read All

Save All

Clear All

Firmware Size

Hardware Version

Password (For SMS Command)

OFF

0~999999

Time Zone

UTC 00:00

No Disturb Time

OFF

from

to

SMS Prefix

OFF

0~20 bytes

Delivery date

IMEI

ICCID

MAC Address

Date Time

Start Time

Run Time

Version

FW Version


GSM Module

Save


Current Model: EV-07B

Battery

Klik vervolgens in de pop-up op *Select* en selecteer het gedownloade zip-bestand in uw bestanden.

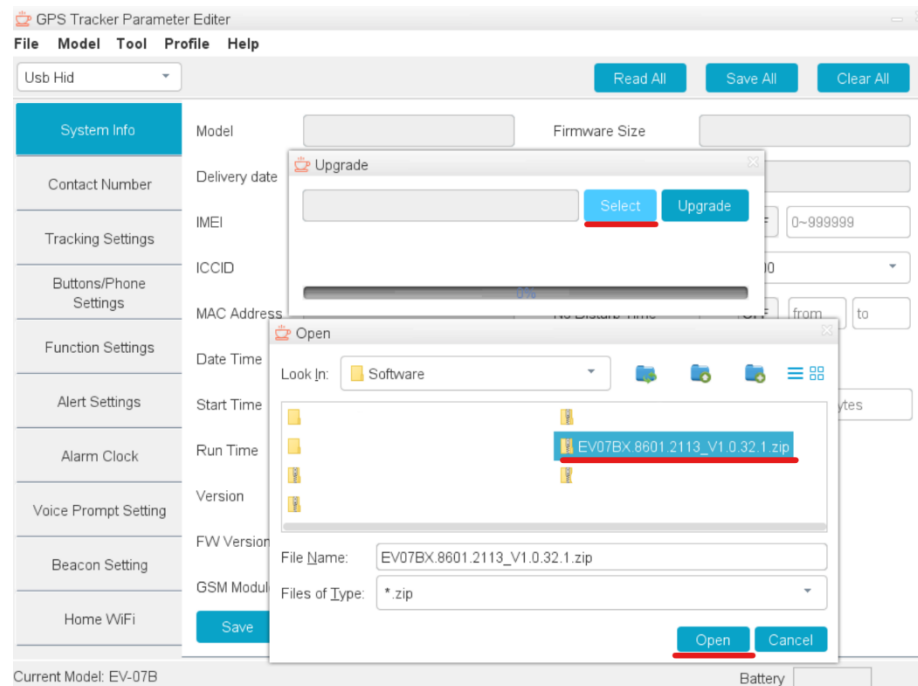

Let op: Als u een MS5x alarm horloge of EV-04 noodknop heeft, zorg er dan voor dat de optie *system update* is aangevinkt.

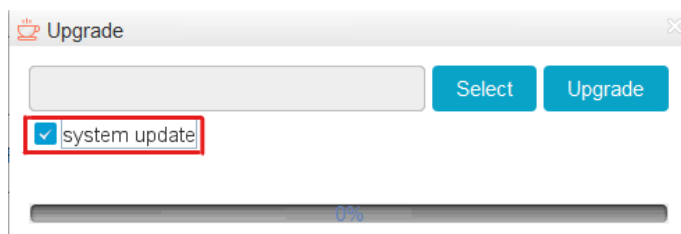

Klik vervolgens op *Update* om uw SOS-knop te updaten. Het is belangrijk dat uw SOS-knop verbonden blijft met uw computer totdat deze helemaal opnieuw is opgestart en weer de melding geeft: “Uw alarm wordt opgeladen”.