

## Vervangen van de 9Volt batterij bij de Defibtech AED

De Defibtech defibrillator heeft een disposable 9Volt batterij met de levensduur van 1 jaar, die speciaal in de grote accu zit voor de zelftesten die de AED uitvoert.

De batterij dient als volgt vervangen te worden:

1. Zorg dat er een elektrode in de defibrillator geïnstalleerd is.
2. Druk op de zijkant van de AED op de oranje knop zodat de grote accu uit de AED schiet.
3. Verwijder de oude 9Volt batterij.
4. Plaats de nieuwe 9Volt batterij, let daarbij goed op de + en -. Nadat u de batterij geplaatst heeft klikt u de grote accu weer terug in de AED. De AED zal een test uitvoeren op de accu en dit aangeven.



5. De Defibtech defibrillator is nu klaar voor gebruik.

**TIP: Controleer direct de houdbaarheidsdatum op de AED-elektrode. Verlopen elektroden kunnen uitdrogen waardoor deze niet meer te gebruiken zijn bij een reanimatie.**

**CHRISTEL**  
Klantenservice

