


Vervangen van de Zoll AED Plus batterijen

De Zoll AED Plus defibrillator heeft een disposable batterijen met lange levensduur, die in stand-by ongeveer vier à vijf jaar meegaan.

De batterijen worden als volgt vervangen:

1. Zorg dat er een elektrode in de defibrillator geïnstalleerd is.
2. Ga naar de batterijruimte op de achterkant van de defibrillator.
3. Verwijder de oude batterijen.
4. Plaats de nieuwe batterijen. Nadat u 7 of 8 batterijen geplaatst heeft geeft de AED aan welke elektroden in de AED geplaatst zijn. Als u alle batterijen geplaatst heeft dient u even te wachten en dan zal de AED aangeven dat u op het knopje dient te drukken als de batterijen nieuw zijn. In het compartiment waar u de batterijen in heeft geplaatst zit een klein doorzichtig knopje daar moet u even op drukken.

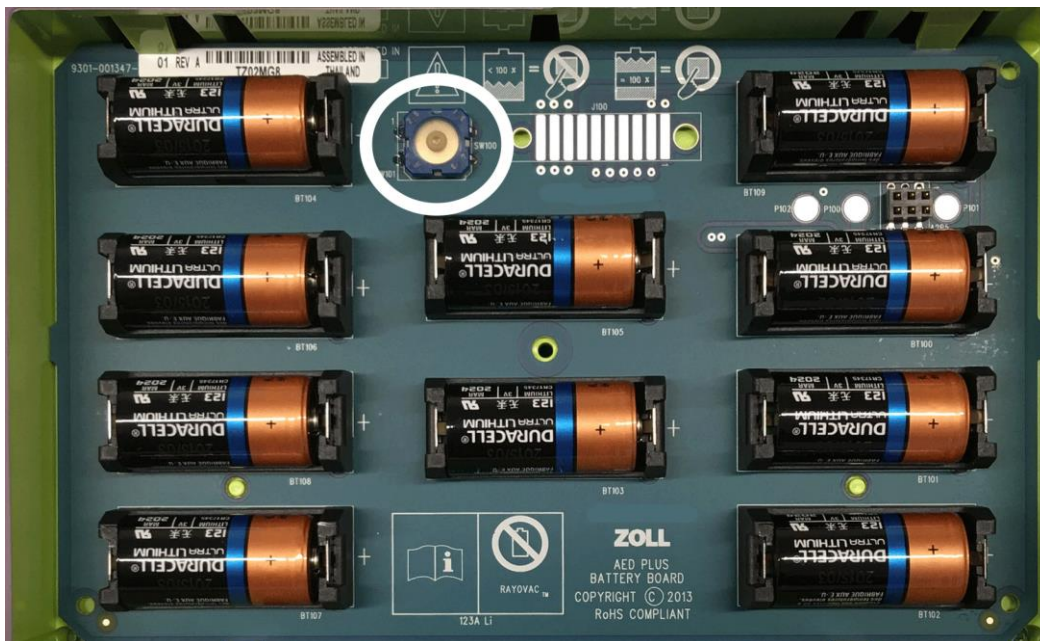

5. Daarna kunt u het compartiment sluiten en zal aan de voorkant weer een groene vink verschijnen. De Zoll AED Plus defibrillator is nu klaar voor gebruik.

TIP: Controleer direct de houdbaarheidsdatum op de AED-elektrode. Verlopen elektroden kunnen uitdrogen waardoor deze niet meer te gebruiken zijn bij een reanimatie.

CHRISTEL
Klantenservice

