

Vervangen DefiSign elektrode

Vooraf aangesloten elektrodes vervangen:

1. Neem de batterij uit.
2. Verwijder de sticker met het LOT-nummer/de vervaldatum van de elektrodeverpakking en plak deze boven de status-led.
3. Open de kap.
4. Sluit de elektrodekabel aan op het apparaat.
5. Plaats de elektrode set in de kap en sluit de kap.
6. Controleer of de elektrodekabel of -set niet worden geplet door de kap.
7. Plaats de batterij terug na het sluiten van de kap.
8. Het apparaat is klaar voor gebruik als de status-led knippert en de service-leds uit zijn.



CHRISTEL
Klantenservice

