

## Vervangen van de HeartSine Samaritan Pad-pak

U kunt de oude Pad-pak uit de AED klikken via de achterkant met de indrukbare klipjes (zie foto).

Niet aan het groene labeltje trekken a.u.b., daarmee trekt u namelijk de elektrode eruit.

De nieuwe Pad-pak kunt u dan in de AED schuiven en op de AED zal dan weer het groene lampje knipperen.



De oude Pad-pak mag u weggooien bij het chemisch afval omdat hier ook de accu in zit.

**CHRISTEL**  
Klantenservice

