


Handleiding

XFT-120H CPR-polsband



1. Productintroductie

De CPR-polsband maakt gebruik van versnellingsmeters en geavanceerde algoritmes om de snelheid en diepte van borstcompressies tijdens reanimatie te detecteren en feedback te geven.

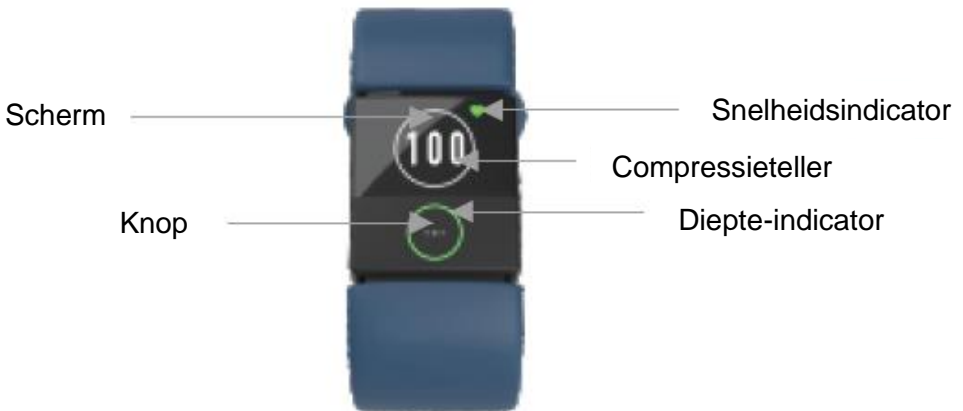

2. Gebruiksaanwijzingen



The CPR-polsband kan los worden gebruikt of in combinatie met de XFT-120G AED Trainer.

2.1 Gebruik los

2.1.1 Aanzetten van de polsband

Houd de knop op de polsband 3 seconden lang ingedrukt, de snelheidsindicator rechtsboven verandert van wit naar rood naar groen en vervolgens verschijnt het XFT logo in beeld.

2.1.2 Start van de reanimatie

Nadat de polsband is ingeschakeld verschijnt  voor 10 seconden op het scherm. Druk binnen de 10 seconden op de knop en op het scherm verschijnt  en de polsband gaat de standalone modus in.

Feedback CPR-polsband

Icoon	Feedback	Opmerking
	Compressie is te snel	>120 per minuut
	Compressie is normaal	100-120 per minuut
	Compressie is te langzaam	<100 per minuut
	Compressie is te hard	>6 cm
	Compressie is normaal	5-6 cm
	Compressie is te zacht	<5 cm


Wanneer de compressie te hard of te zacht is, zal de polsband elke twee seconden een 'piep' laten horen.


2.2 Verbinden met de XFT-120G AED Trainer

2.2.1 Trainer en polsband aanzetten

Zet eerst de trainer aan en vervolgens de polsband door 3 seconden lang de knop in te houden totdat de snelheidsindicator groen wordt.

2.2.2 Verbinden XFT-120G AED Trainer met CPR-polsband

Nadat de polsband is ingeschakeld verschijnt  voor 10 seconden op het scherm. Als de trainer dan ook aan staat zullen beide apparaten automatisch verbinden. Als de verbinding succesvol tot stand is gebracht verschijnt


 op de polsband. De AED Trainer kan vervolgens normaal worden gebruikt en de trainer geeft tijdens de reanimatie live feedback. Als de trainer uit wordt geschakeld verschijnt  op het scherm om aan te geven dat de verbinding is verbroken.

3. Afsluiten polsband

Houd voor het afsluiten van de polsband 3 seconden lang de knop in.

4. Opladen

Trek het bandje aan de kant van de snelheidsindicator eraf en verbind de USB-aansluiting met een oplader. De USB-aansluiting van de polsband past in elke telefoonoplader met een USB-ingang en in de USB-poort van een computer. Het duurt ongeveer 3 uur voordat de polsband volledig is opgeladen. Als de polsband volledig is opgeladen verschijnt er op het scherm: "POWER: 100%".

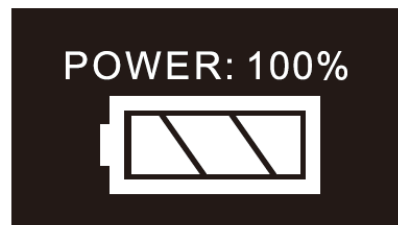

5. Specificaties

Product naam: CPR-polsband

Model: XFT-120H

Batterij: DC 3,7V oplaadbare lithium batterij

Input stroomsterkte: 120 mA (MAX)

Draadloze verbinding: Bluetooth 5.0

Afmeting: 74x70x33 mm

Gewicht: 39 g

Werktemperatuur: 5°C - 40°C

Opslagtemperatuur: -20°C - 55°C